



Tepi sCover B -käyttöohje ja takuu

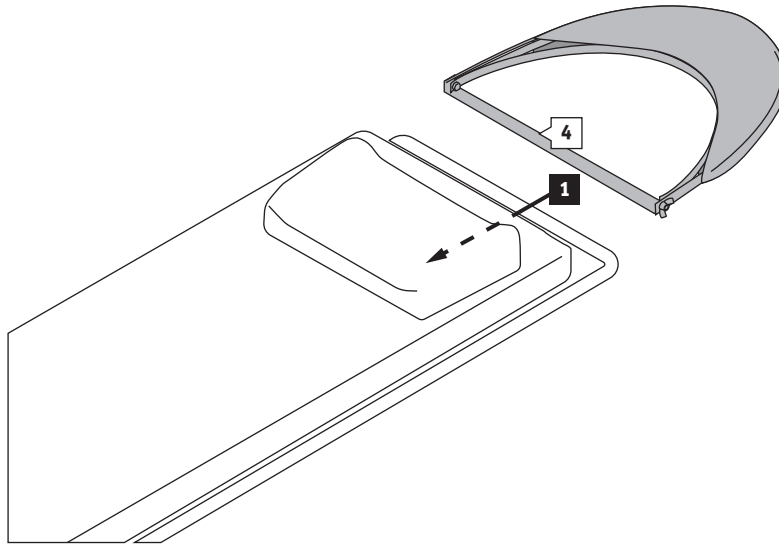

1. Aseta sCover käyttökuntoon siten, että sCover mahtuu patjan päälle, ja alarauta (osa nro 4) jää tyynyn ja patjan väliin. Jos sängyn pääty estää työntämisen päädyn suunnasta, sCover voidaan asettaa paikalleen suoraan pystyasennosta, koska alarauta on käännettävissä vaaka-asentoon, jolloin se liukuu helpommin tyynyn alle.

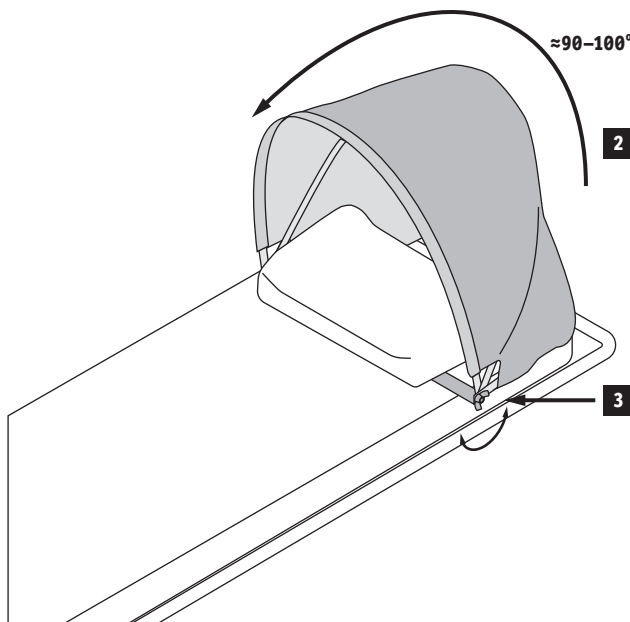

2. Käänä kuomu haluamaasi asentoon max. n 90-100 astetta.
3. Siipimutteria kiertämällä voit vaikuttaa kuomun liikkuvuuteen.

Tepi sCover B -käyttöohje ja takuu



TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tepi sCover on tarkoitettu potilaan tai asiakkaan suojaamiseen siirtojen ja kuljetusten aikana sekä odotettaessa hoitotoimenpiteitä, ja se soveltuu ainoastaan edellä esitettyihin käyttötarkoituksiin. Valmistaja, jakelija tai myyjä eivät ole vastuussa suorista tai välillisistä vahingoista, joita tuotteen käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa aiheuttaa.

Tuotteen virheellinen tai huolimaton käsittely saattaa mahdollistaa hiusten, sormien tai muiden kehon osien joutumista tuotteen osien väliin.

Pidä Tepi sCover poissa lasten ja ulkopuolisten ulottuvilta.

TAKUU

Tuotteella on normaali virhe- ja materiaalivastuusta määritelty, kuluttajan-suojalain mukainen takuu, jonka pituus on 12 kuukautta.

Takuu kattaa valmistus- tai materiaalivirheistä aiheutuneet viat, jotka ovat ilmenneet takuuajana. Edellytyksenä on, että virheestä ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta. Virheen havaitsemisen hetkestä tulee tuotetta käyttää tavalla, joka ei pahenna virhettä, ei aiheuta turhia lisävaurioita eikä vaaranna käyttöympäristössä olevia tahoja.

Takuuajaka alkaa, kun asiakas on vastaanottanut ostamansa tuotteen. Takuu edellyttää aina, että tuotetta on käytetty asianmukaisesti siten, kuin tuote on tarkoitettu.

Yrityksen, yhteisön tai kuntayhtymän nimissä tehty ostos ei ole kuluttajasuojalain piirissä, ja siten myös takuehdot poikkeavat kuluttajakaupasta. Yrityksen, yhteisön, kuntayhtymän tai muun yhteisön nimissä tehdyille ostoksille on 12 kuukauden takuu. Yrityksiäsiakkaan tuotetakuuseen sovelletaan muuten samoja ehtoja kuin edellä.

TUOTTEEN VIRHE

Tuotteessa havaitusta virheestä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen info@tepi.fi

Virheilmoitukseen on sisällytettävä mahdollisimman tarkka kuvaus virheestä (mahdolliset kuvat). Takuun piiriin liittyvistä reklamaatioista on ilmoitettava viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun virhe on huomattu, tai virhe olisi pitänyt havaita. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteen heti sen vastaanottamisen yhteydessä. Tuotetta on käytettävä siinä ympäristössä ja siten, kuin se on suunniteltu.

Virheen arvioinnissa tuotetta tarkastellaan sen normaalissa käyttöympäristössä ja asennossa niin, että tuote on koottu käyttökuntoon täysin oikein ja sen toiminnallisuuksia on käytetty ohjeen mukaisesti.

Tuotteen valmistaja arvioi saadun tiedon ja kuvien mukaan, onko tuotteessa virhe ja harkintansa mukaan joko korjaa tai korvaa tuotteen uudella vastaavalla tuotteella.

TAKUUN PIIRIIN KUULUMATTOMAT ASIAT

Tuotteen normaali kuluminen, venyminen, värimuutokset, kolhiintuminen tai asiakkaan itse aiheuttamat, käytöstä, kuljetuksesta, asennuksesta ja varastoinnista johtuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Esimerkiksi kankaiden rypyt, kuluminen, haalistuminen ja venyminen ovat normaaleja muutoksia.

Takuu raukeaa tuotteen sopimattomasta käytöstä, huonosta kunnossapidosta, terävien esineiden väärinkäytöstä, tuotteen vääntämisestä tai kokoamis- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Reklamaation korvattavuus selvitetään tapauskohtaisesti, mikäli on syytä olettaa, että tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti, tai tuotetta on muokattu tai korjattu jonkun muun henkilön tai edustajan kuin Tepi Terveyspalvelut Oy:n toimesta. Mikäli tuotteen tarramerkinnot, tuotenumero on poistettu, irrotettu, muokattu tai tehty mahdottomiksi lukea, on hyvin todennäköistä, ettei tuote kuulu reklamaation piiriin. Takuu ei kata tuotteen virheestä johtuvia välillisiä vahinkoja tai sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käytöstä. Tepi Terveyspalvelut Oy ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat takuun piiriin toimitettavan tai korjattavan tuotteen viivästyksestä.

OSALUETTELO JA TUOTENUMEROT


sCover B:	30008
1. Etukaari:	130005
2. Keskikaari:	230005
3. Alakaari:	330005
4. Alarauta:	B430008

Puuvilla suojakangas, vihreä: 30028
Puuvilla suojakangas, sininen: 30038

Kiinnitystarvikkeet

Lukkomutteri
Muoviprikat, 2 kpl
(keskikaaren molemmin puolin)
Pultti

Pultti
Lukiteprikka
Muoviprikat, 2 kpl
(keskikaaren molemmin puolin)
Jousiprikka
Siipimutteri

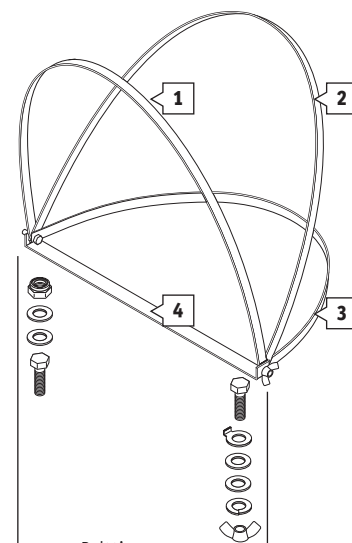

YHTEYSTIEDOT:

tepi-scover.fi

info@tepi.fi

p. 0400 468 198

11/2021